

はじめに

脚マクラの2世代目、レッグエンジェル・フィットは基本設計から大幅に見直しました。

まずは、体格に合わせてフィットさせるベルト型の脚マクラに設計を変更。

さらに、ひきしめ圧力を最大で3倍以上、高めることができる新開発パワーベルトにより、自由に圧力の調節が可能になりました。

新たに設計されたレッグエンジェルフィットで、翌朝には脚スッキリ。

毎日くりかえし、ご使用いただくことで、見ためにも美しく、脚の健康がたもてます。



この脚にマクラ装着する新発想の製品は、発売から注目され、たびたびテレビや雑誌などで紹介されています。

■テレビ

あさナビ/Nスタ/スーパーニュース/ヒルナンデス!/ZIP!/ニュースな
ぜ太郎/熱中世代/ミュージックドラゴン/ヒットの秘密/情報バラエ
ティー『PON!』/やすとものどこいこ!?...etc.

■雑誌・新聞

日経トレンディ/CanCam/an・an/パンプキン/MonoMax/美ST/
ローラ/BLEND/朝日新聞 朝刊/Tarzan/オレンジページ...etc.



ドクター・スミスについて

世界ではじめて燃料の炭を、生活用品にとりいれ商品化したブランドです。デザインの本場イタリアにてグランデザイン賞を受賞。世界で高い評価を受けています。



グランデザイン賞

ドクター・スミスの受賞歴


1994.9 イタリア grandesign 展 グランデザイン賞を受賞。/
1996.12 大阪府研究開発型企業振興財団より優秀賞を受賞。/
1997.2 日本経済新聞社よりベンチャーエキスポ優秀賞を受賞。
/ 2000.10 財団法人 大阪デザインセンターより中小企業優秀
賞を受賞。/ 2001.3 財団法人 大阪デザインセンターより年間
優秀賞を受賞。/ 2001.10 日本産業デザイン振興会よりグッド
デザイン賞を受賞。/ 2008.5 財団法人 大阪デザインセンター
よりグッドデザイン賞を受賞。/ 2008.11 財団法人 日本産業デ
ザイン振興会よりグッドデザイン賞を受賞。/ 2010 大阪もの
づくり優良企業賞を受賞。/ 2011.11 財団法人 日本産業デザ
イン振興会よりグッドデザイン賞を受賞。

株式会社 高島
〒569-0071 大阪府高槻市城北町 1-5-25 FJYビル5F
TEL 072-672-3336

no.54120N

Dr.Smith®

取扱説明書

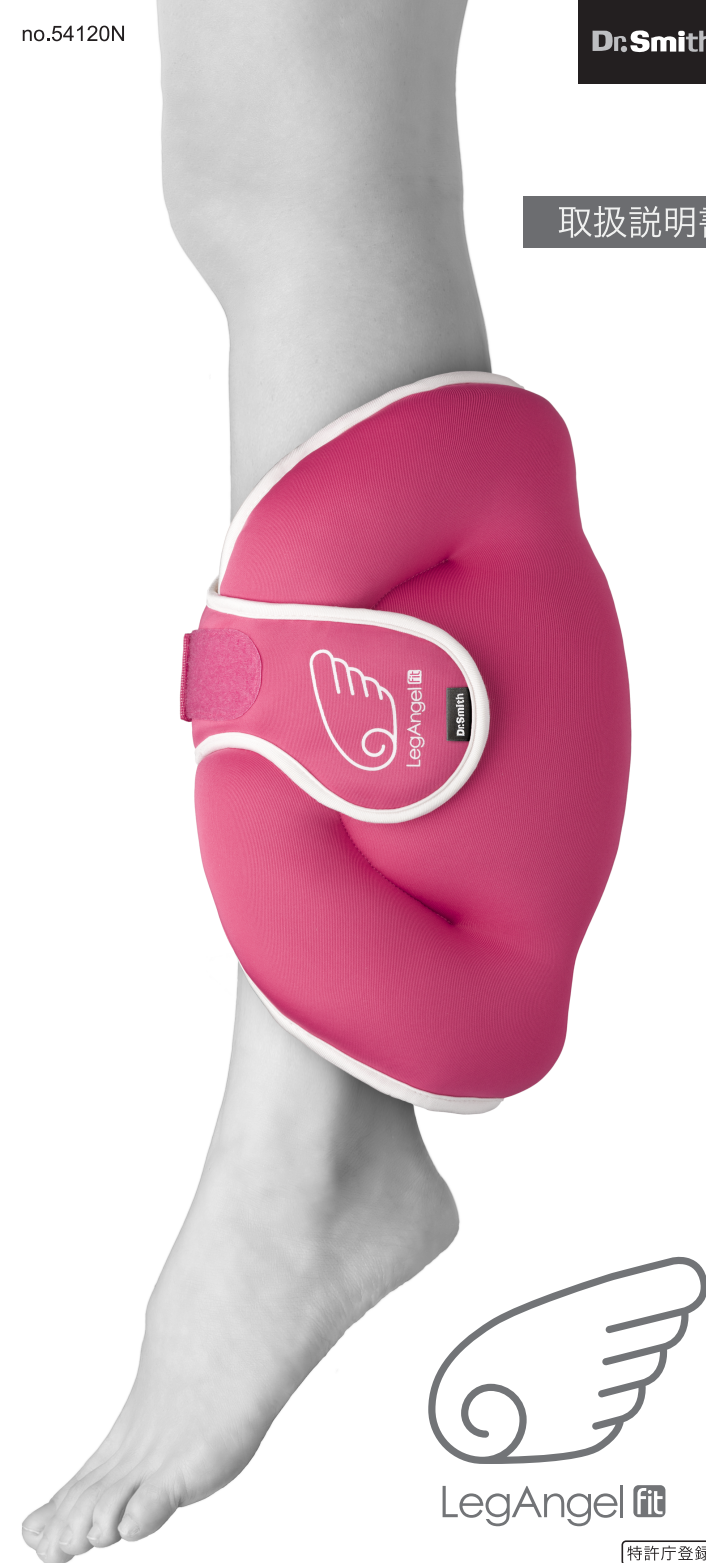


LegAngel fit

特許庁登録済

使い方


1.ふくらはぎに巻きつける。

ベルトを締めるように、ふくらはぎに巻き付けます。このとき、あまり強くまきつけずにズレ落ちないでいどにしておきます。

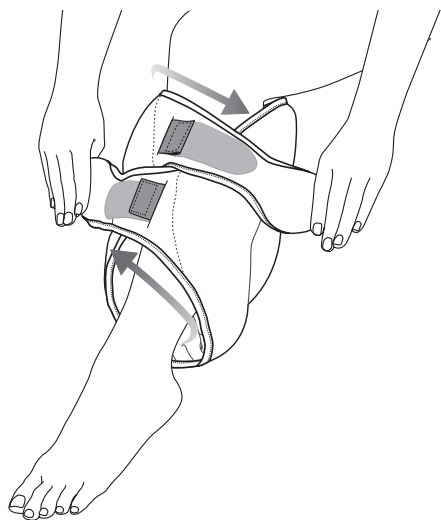

2.新機能で、さらに引き締め。


新機能のパワー・ベルトで、さらに脚をひきしめられます。パワー・ベルトを引きながら廻し止めることで、引き締めたい圧力になるまで無段階に調節できます。*最大3倍の圧力に高められます。

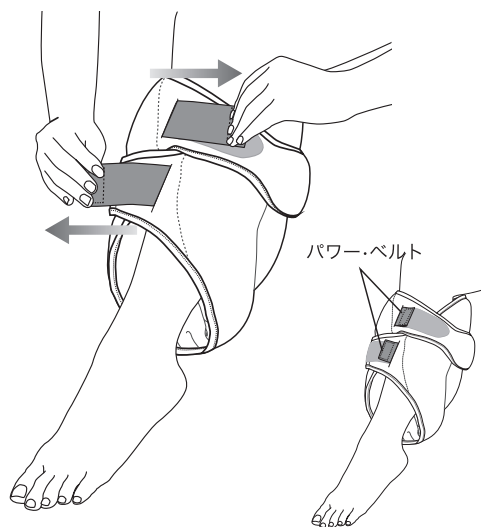

※圧力の数値は、社内基準によるデータです。

3.着けたまま歩けます

製品本体をカカトから少し引き上げると歩きやすくなります。
(躓かないように注意)

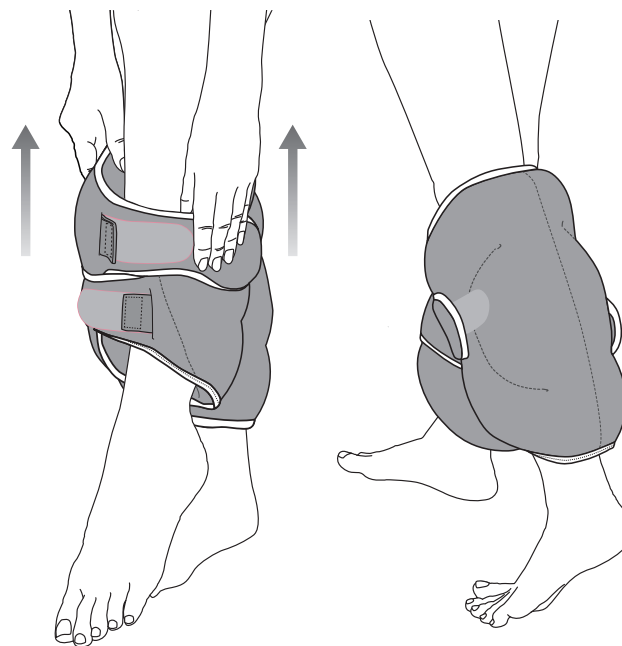

使い方注意点

使い方1の注意点

○本製品を無理に引っ張ったりしないでください。製品が破損して中材である極小ビーズが漏れだす恐れがあります。○ふくらはぎ以外の部分で使用しないでください。事故の原因になります。まれに本製品を装着して眠ると寝返りの姿勢により腰痛を起こす場合があります。腰や関節など痛みを起こしやすい方は睡眠時のご使用をお避けください。

使い方2の注意点

○血流が止まるほど強く閉めないでください。15分以上、血流が止まった状態が続くと危険ですので絶対にしないでください。

使い方3の注意点

○本製品を装着したまま歩行する場合は、通常の歩行時より脚の幅が必要です。転倒しないように注意してください。転倒した場合当方では責任を負いかねますので予めご了承の上ご使用ください。

洗濯方法

●部分洗い:汚れが気になる箇所を、部分的に手洗いしてください。丸洗いはできません。また、洗濯機は使用できません。●常温乾燥:乾燥機などの温風やストーブなど高温加熱による乾燥は、製品の破損および発火の原因になります。常温で乾燥してください。●汚れ防止:製品の内側の汚れが気になる方は、長めの靴下をはいてご使用ください。

安全上の注意

人への危害、財産の損害を防止するため、必ずお守りいただくことを説明いたします。

皮膚にアレルギーのある方へ。

化学繊維(ポリエステル、ナイロン等)で過敏症の方は、必ず医師にご相談の上ご使用ください。

警告:「死亡」や重傷を負う恐れがある内容です。

○医師の治療を受けているときや以下の人は必ず医師と相談のうえ使用してください。▶悪性腫瘍のある人、心臓に障害がある人、妊娠中・出産直後の人、末梢循環障害による知覚障害のある人、骨粗鬆症・骨折・捻挫・肉離れ等の急性疼痛疾患の人、体調がすぐれず安静を必要とする人、脚部に重度の血行障害のある人、椎間板ヘルニアの人○前記以外に特に身体に異常を感じている人○製品が破損し中材の極小ビーズを飲み込む、目に入る等した場合は、直ぐに医師の診察を受け指示に従ってください。

禁止:「安全」を守るためしてはいけない内容です。

○医師からマッサージ等を禁止されている人は使用しないでください。(例:血栓症、重度の動脈瘤、急性動脈瘤、皮膚炎、皮膚感染症の人)○製品改造をしない。製品を勝手に改造等をおこなわないでください。○足上げ枕以外の目的で使用しないでください。○幼児やお子様、また自分で身体を動かすことが出来ない人はご使用にならないでください。○製品本体の上で遊んだり、乗ったりしないでください。○製品本体を破損させたり、加工したり、引っ張ったり、ねじったり、重いものを載せたりしないでください。○濡れた手で本製品をさわらないでください。○浴室等湿度の高いところでは使用しないでください。

注意:「傷害」を負うことや、財産の損害が発生する恐れがある内容です。

○使用中に身体に異常があらわれたり、感じたときは直ちに使用を中止し、医師に相談のうえご使用ください。守らない場合、事故や体調不良をおこす原因になります。○本製品を装着した状態での歩行、階段の上り下りの際は十分ご注意ください。

品質表示

製品名:レッグエンジェルフィット、生地:ポリエステル100%、面ファスナー:ナイロン100%、詰め物:発泡ポリスチレン

■その他製品について

商品改良のため、仕様・外観は予告なしに変更することがありますのでご了承ください。